

メンテナンス機器の返送について

お客様各位

この度は、弊社水素吸入器 H2 メディカルパワー® MEGA シリーズをご利用いただきありがとうございます。
誠にお手数をおかけいたしますが
機器を弊社に送付の際、下記、梱包をお願いします。



梱包方法

- 01 手動ポンプ等でタンク内の精製水を抜いてください。多少、タンク内に精製水が残っていても大丈夫です。
- 02 タンクの蓋のしっかり締めてください
- 03 水素、酸素の排出口にお届け時に取り付いていた「キャップ」をしてください。
- 04 機器を緩衝材で囲ってください。必ず【**機器本体のみ**】梱包ください
※付属品を同梱いただいた場合、管理いしたしかねますのでご了承ください。
- 05 箱の上下を確認して、箱の上部から機器を入れてください。箱を横にして、機器を横に滑らすように箱に入れていただいてもかまいません。機器が箱の上下と逆さまにならないように注意してください。箱に入れたら、テープ等で箱を閉じてください。
- 06 同梱の着払伝票を箱の上面に貼り付けて、返送をお願いします。

弊社より機器をお届けさせていただいた箱、緩衝材をご利用ください。
箱、緩衝材がない場合は、弊社よりお送りさせていただきます。(有償 5000 円税込・送料込)
緩衝材等を使用しないで発送したり、弊社到着時に機器が破損していた場合、お客様と宅配業者さんとの交渉になりますのでご了承ください。

お届け先

TO 郵便番号 378-0322

おところ 群馬県沼田市利根町老神 531-1

おなまえ MAKE MEDICAL 株式会社

でんわ 03-6899-5234

送料

保証期間内、レンタルの場合：着払い
保証期間外の場合：元払い
大変お手数をおかけいたしますがよろしく願い申し上げます。

返送手配後

送り状の写真を LINE 公式アカウント、もしくは、メールにて送信をお願いします。弊社に到着が確認できず、送り状番号等不明の場合は、相当の機器代をご請求、もしくは、お客様負担となってしまいますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。



メイクメディカル

MAKE MEDICAL株式会社

水素吸入器 H₂メディカルパワー® で”不可能”を”可能”に!

【銀座本社 & 無料体験ショールーム】〒104-0061 東京都中央区銀座 5-14-3MAKE ビル (銀座 5 丁目ビル)

【FACTORY】〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神 531-1 ☎03-6899-5234 ✉info@make-medical.com



LINE公式アカウント MAKE MEDICAL