

1. 使用環境

密閉された空間では使用しないでください。必ず換気し、風通しの良い場所で使用してください。万が一、部屋内に水素ガスが充満すると、爆発の危険があります。

2. 水素ガスの充填禁止

水素ガスをペットボトル等に充填することは禁止です。水素を溜める行為は極めて危険ですので、絶対に行わないでください。

3. 火気厳禁

機器周辺では、ライター、ストーブ、コンロなどの火気を使用しないでください。

4. 静電気対策

静電気の発生を防ぐため、以下の対策をしてください。乾燥した環境での使用は避けてください。静電気が発生しやすい衣類（ウール、化学繊維など）を避けてください。静電気除去ブレスレットの着用を推奨します。使用するベッドや設備も静電気対策を施してください。特に静電気体質の方や体調がすぐれない方は、静電気の影響を受けやすい場合があります。

5. 接続管の安全確保

カニューラや接続管が折れたり、つぶれたりしないようにしてください。ガスが管内やストラップボトル内に滞留すると危険です。機器から発生する水素・酸素ガスが常に排出される状態を保ってください。

6. 酸欠防止（MEGA3600・MEGA4800）

MEGA3600・MEGA4800は、水素発生量が多いため、酸素吸入量が不足する可能性があります。必ず水素と酸素を同時に吸入してください。

7. 火災報知器の誤作動について

使用中に火災報知器が作動する可能性があります。火災報知器のスイッチをOFFにするか、離れた換気の良い場所でご使用ください。

8. 免責事項

本製品の使用に伴う損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。安全に十分ご注意の上、ご使用ください。

9. 精製水の交換

必ず、1か月に1回の交換、かつ、使用時間100時間毎に交換をしてください。交換しない場合、精製水が腐敗し、健康を害する場合があります。

10. アースの接続について

医療用物質生成器は、電気安全法でアース線の接続が定められています。電化製品は、アースを接続しなくても利用はできますが、お客様ご自身の責任においてご判断の上、ご利用ください。

MEGA4800用専用コンセント

MEGA4800は、消費電力1700Wです。
単相100V 20A、もしくは、単相200V 10Aのいずれかの専用屋内配線と専用コンセントをご準備ください。
設置するコンセントはWK3811パナソニックを設置してください。
アマゾン、モノタロウにて購入できます。
最寄りの電気屋さんにご相談の上、屋内配線、設置をお願いいたします。
万が一、返品、返却の際、電気工事代はお客様負担となります。
ご了承の程よろしくお願い申し上げます。



パナソニック(Panasonic)
15A・20A兼用接地角型コンセント

★★★★★ (15件のレビュー)

🚚 当日出荷 📦 当日出荷とば

定格電圧(V): 250

250 125

🔍 全品種類を一覧で見る

内容量: 1個 | 注文コード: 35163373 | 品番: WK3811