

COOLINGカニューラ 取扱説明書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

特徴

世界初※1 カニューラ自体に、ガスに含まれる水蒸気を液化する COOLLING機能を付加したカニューラです。(特許出願中) 水素発生量が少ない機器では、鼻部に水滴が出ることはまれですが水素発生量が2000ml/分を越えると、鼻部に水滴が出てきます。

ガスに含まれる水蒸気が鼻部に到達したときの温度変化で液化するためです。

カニューラの管の途中に、カニューラの管と違う材質を使用することでガスを冷却し、その冷却パイプを通過する際に、水蒸気を液化して、鼻部に水滴が発生しないようにしています。

※1 弊社調査において

各部名称

吸入部 2種類あります。

管が細いタイプ

細いので耳に掛けやすいが、
管が細いので、吸入部から排出音があります。
MAGA2400以上は、ガスの勢いが強く、
鼻内が痛くなる方もあります。



管が太いタイプ

太いので、耳に掛けにくい方もあります。
吸入部からの排出音は、
とても小さいです。ガスの勢いも少ないです。



ストラップボトルへ 接続

吸入部

クッション

※クーラー管が衣服や肌に
直接触れないように
クッションでガードします。

クーラー管

※クーラー管が衣服や肌に
触れたり、手で持ったり
すると冷却効果が低下します。

クッション

ストラップ管

ストラップ管

お好みでご利用ください。



使用方法

右図を参考ください

吸入部を鼻にあてて、管を耳にかけてください。

※ストラップ管に水が溜まったら、適宜、取り除いてください。

※クーラー管が、衣服や肌に触れると冷却効果が低減します。


※ストラップ管が斜めや横になると鼻部に水滴が出ることがあります。

ストラップ管の取り外し方

ストラップ管に水が溜まったたら、水を取り除きます。

プラスチック部分を半分づつ持って回すと外れます。


水を抜き取って、また、もとに戻してご利用ください。

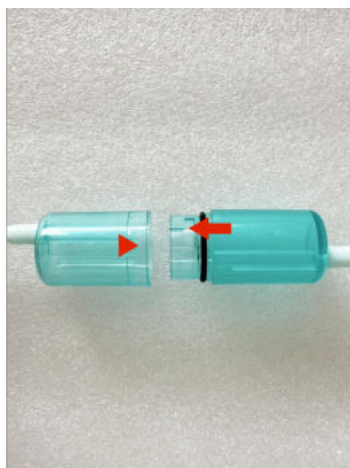

ビーズ管の調整

お好みで、ハサミでカットして
ご利用ください。

・・・ 切り取り線 ✂️

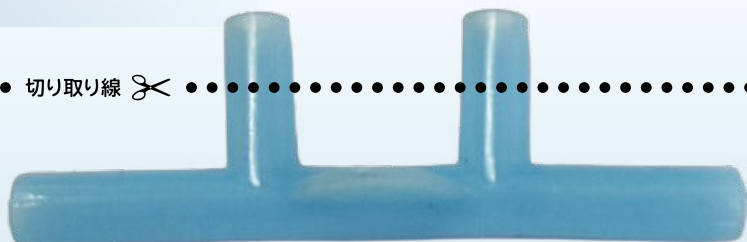

※必ず、水素吸入器稼働していない

水素吸入器と接続していない状態でカットして下さい。

ご利用後

ストラップボトルから、カニューラを外してください。

毛細管現象でカニューラより水が出る場合があります。



MAKE MEDICAL 株式会社

水素吸入器 **Hydroxone** で“不可能”を“可能”に！

世界最大級の水素発生量の
水素吸入器メーカー！製造・直販



03-6824-4399



info@make-medical.com



公式LINEアカウント



ホームページはこちら

【本部】〒166-0012 東京都杉並区和田3-31-12

【販売部】〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台1-51-1-301