

カニューラ WATER LESSキット (特許出願中)

取扱説明書


鼻部に水がこない究極のカニューラ用キットです。(特許出願中)

下記のストラップ管内に設置して利用します。

鼻に水がこないから「睡眠中」も安心!!

水止めカニューラ
WATER LESS

COLLINGカニューラ
WATER LESS

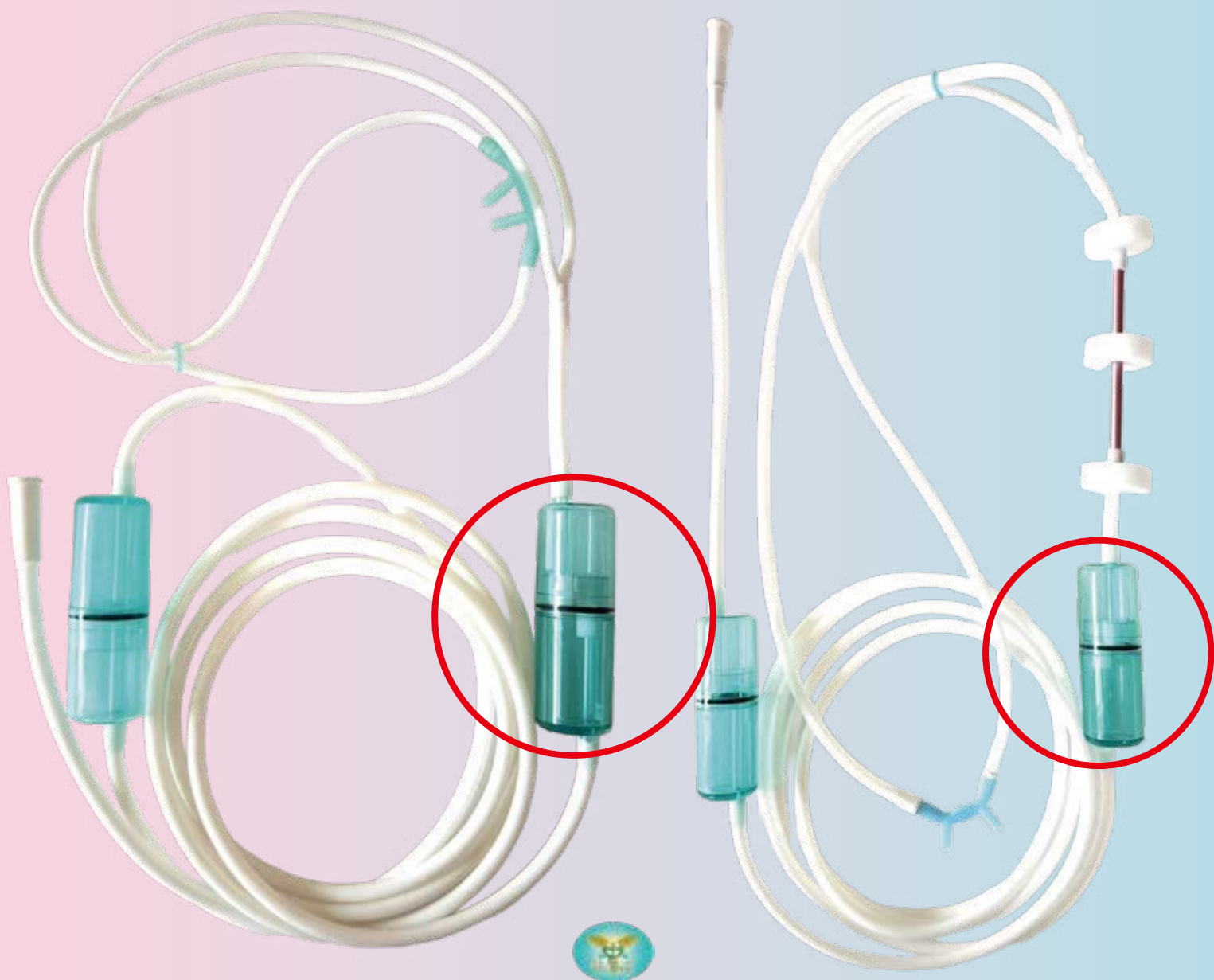

キット内容

- 01 高分子吸水ポリマー
- 02 キャップ
(高分子吸水ポリマーがカニューラ管内に入るのを防止します。)
- 03 ピンセット
(キャップ取付用ピンセット)

※キャップなしをご注文の方は
キャップ、ピンセットは付属されていません。



取付方法

- 01 カニューラの鼻部に近いストラップ管
(前ページのカニューラ写真参照)を
白い管から取り外します。




- 02 ストラップ管を2つに分解します。
左、半分ずつ持ってそれぞれ逆方向に
回すと取り外せます



03 ストラップ管の水分を取り除いてください。
濡れている使用中に吸水能力が低下します。



04 それぞれのストラップ管内の管に
付属の白いキャップを取り付けます。

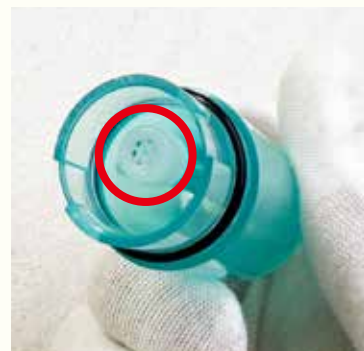

05 付属の高分子吸水ポリマーを5粒取り出します。
濡れていない手で取り出してください。

高分子吸水ポリマーは食べ物ではありません。

絶対に口に入れないでください。

窒息などの危険があります。

小さな子供の手の届かない場所に
保管してください。



06 黒いリングの取り付いている方に
高分子吸水ポリマーを5粒入れてください。
多く入れると、すぐにストラップ管内が
ジェルでいっぱいになります。ご注意ください。

※約 1.5mm以下の大きさの高分子吸水ポリマーは、
使用しないでください。カニューラの管の中に入
ってしまいますので、ご注意ください。

※白いキャップのないストラップ管で
高分子吸水ポリマーの使用は厳禁です。
管が詰まる可能性があります、危険です。



高分子吸収ポリマー



- 07 ストラップ管を組み付けて
ストラップ管にカニューラ管を
接続してください。
黒いリングが付いているストラップ管を
ストラップボトル側に接続してください。



- 08 耳にカニューラ管をかけてご利用ください。



高分子吸水ポリマーの交換

ストラップ管内の水が徐々にジェル化します。
右図のように白いキャップのところまで
ジェル化されたら高分子吸水ポリマー交換です。
それ以上、ジェル化が進むと
ストラップ管内でガスが詰まって危険です
必ず、使用を停止して
高分子吸水ポリマーを交換してください。



交換方法

01 ストラップ管を管から取り外します。



02 ストラップ管を2つに分解します。



03 白いキャップを無くさないように、
外れないように内部を
水洗いしてください。

上下を逆方向に回して、ストラップ管を2つに分けて下さい。

以降は、取付方法 3から同じ要領でご利用ください。

注意事項

- ストラップ管に入れた状態で水分があると時間の経過とともに、高分子吸水ポリマーが膨張します。必ず、白いキャップの下部以下にて、ジェル化した高分子吸水ポリマーを取り出してください。ストラップ管内のガス通過穴が塞がれて、ガスが放出されなくなり危険です。
- 水素吸入器の使用開始前に、必ず、ストラップ管内の白いキャップの下部より下の位置以下にジェルがあり、使用開始後も、ジェルが白いキャップの下部以上にならない状態であることを確認の上使用を開始してください。
- 睡眠時に使用する時は、必ず、新しい高分子吸水ポリマーにて使用を開始してください。睡眠中に高分子吸水ポリマーが膨張してストラップ管内のガス通過穴が塞がれて、ガスが放出されなくなり危険です。
- ストラップ管内の白いキャップが無い状態での使用は厳禁です。
管内に高分子吸水ポリマーが入り、管が塞がり、ガスが放出されず危険です。
- 高分子吸水ポリマーは食べ物ではありません。絶対に口に入れないでください。窒息などの危険があります。小さな子供の手の届かない場所に保管してください。
- 高分子吸水ポリマーは、水分、湿気がはまらないように保管をしてください。
- 約 1.5mm 以下の大きさの高分子吸水ポリマーは、使用しないでください。カニューラの管の中に入ってしまうので、ご注意ください。
- 本製品の使用に関する損害については、一切の責任を負わないものとします。お客様ご自身で十分ご注意の上、ご使用ください。



メイクメディカル

MAKE MEDICAL株式会社 水素吸入器 **H₂メディカルパワー[®]** で”不可能”を”可能”に!

【銀座本社 & 無料体験ショールーム】〒104-0061 東京都中央区銀座 5-14-3MAKE ビル（銀座5丁目ビル）

【FACTORY】〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神 531-1 ☎03-6899-5234 ✉info@make-medical.com



公式LINEアカウント



ホームページはこちら